

# TRACOE®

## mini

### ***Cuanto más pequeño, más grande***

La verdadera grandeza, a veces se muestra particularmente en las cosas pequeñas: Por ejemplo en el caso de la TRACOE *mini* – la línea de productos desarrollada especialmente para neonatos y niños. Las cánulas traqueales TRACOE *mini* son particularmente blandas y constan de una placa con el lado inferior sesgado. De este modo, la cánula consigue una forma de ajuste optimizada y atraumática. Debido a las exigencias particulares en la aplicación en pacientes pequeños, las cánulas constan de unas paredes muy delgadas manteniendo sin embargo siempre su estabilidad de forma. La forma interior lisa en forma de embudo del conector de 15 mm permite la introducción sencilla de catéteres de aspiración.

### ***Ligero y seguro***

El obturador especial es particularmente práctico. La empuñadura del extremo permite introducir la cánula de forma sencilla y segura a pesar de su tamaño reducido. Adecuado para cánulas TRACOE *mini* hay también una pieza de prolongación, intercambiador de humedad y térmico, cintas y compresas especiales.

### ***Soluciones anatómicamente optimizadas***



Para poder hallar la mejor solución para cada paciente pequeño, las cánulas TRACOE *mini* están disponibles en doce tamaños diferentes: cuatro para la aplicación en neonatos y ocho para la aplicación en la pediatría.



REF 350



Código de color



REF 355



Código de color

**Cánula traqueal para neonatos**

REF 350 embalado de forma estéril

- ◆ Cánula
- ◆ Obturador y cinta (fig. página 41)

**Números de pedido y dimensiones: REF 350**

Tam.	① ID (mm)	② AD (mm)	Longitudes (mm)					⑤ BW (°)
			A	C	B	③ TL	④ AB	
2.5	2,5	3,6	6	22	2	30	32	120
3.0	3,0	4,3	7	23	2	32	34	120
3.5	3,5	5,0	8	23	3	34	37	120
4.0	4,0	5,6	9	24	3	36	40	120

**Números de pedido y dimensiones: REF 355**

2.5	2,5	3,6	8	22	2	32	34	120
3.0	3,0	4,3	10	24	2	36	39	120
3.5	3,5	5,0	12	25	3	40	43	120
4.0	4,0	5,6	14	27	3	44	48	120
4.5	4,5	6,3	16	28	4	48	52	120
5.0	5,0	7,0	18	28	4	50	55	120
5.5	5,5	7,6	20	30	5	55	60	120
6.0	6,0	8,4	22	35	5	62	67	120

① ID: diámetro interior de la cánula; ② AD: diámetro exterior de la cánula; ③ TL: longitud en la línea central desde la base de la placa hasta el extremo inferior de la cánula; ④ AB: longitud en el codo exterior desde la base de la placa hasta el extremo inferior de la cánula; ⑤ BW: ángulo de giro.

▶ número de pedido: REF + tamaño, p. ej. REF 355-2.5

**Cánula traqueal para niños**


REF 355 embalado de forma estéril

- ◆ Cánula
- ◆ Obturador y cinta (fig. página 41)



**Variantes de producto REF 355:**

En caso de necesidad podrán fabricarse variantes de productos a medida para ofrecer una funcionalidad y una comodidad óptimas incluso en caso de circunstancias anatómicas y fisiológicas complicadas. En las variantes de productos, la inscripción de la placa es de color verde.

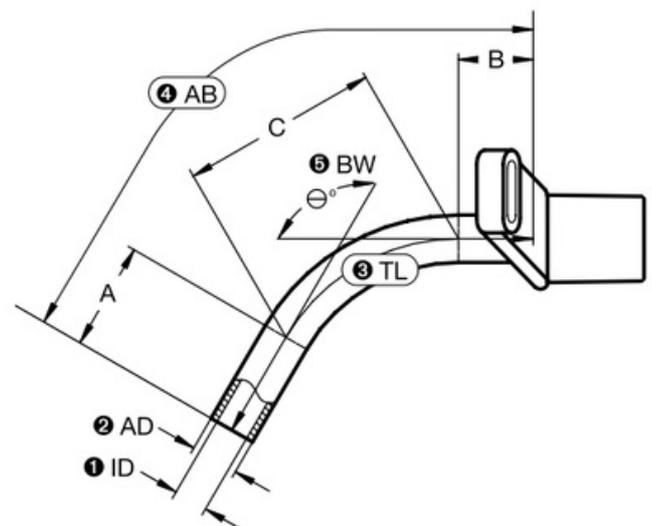



REF 643



REF 356



### TRACOE humid assist mini

REF 643

UE: 50 unidades, embaladas por separado de forma estéril

Intercambiador de calor y humedad con filtro de papel para el acoplamiento a todas las cánulas pediátricas con conector de 15 mm. Este producto se puede utilizar para niños con un volumen tidal (VT) de 7-50 ml.


### Pieza de prolongación TRACOE mini

REF 356

embalada de forma estéril

- ◆ Pieza de prolongación
  - ◆ Ayuda de desconexión ("Wedge")
  - ◆ Ficha técnica con 2 etiquetas de producto desprendibles
- Previene la obstrucción de la abertura de la cánula. El espacio muerto se incrementa en aprox. 3,5-4 ml (cm<sup>3</sup>) lo que corresponde más o menos al espacio muerto normal de niños de 2-3 años.

### Dimensiones en mm:

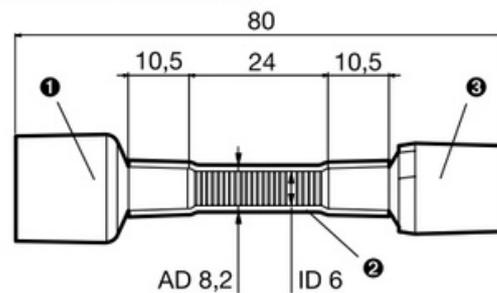

- ❶ Conector (hembra) de 15 mm
- ❷ Tubo, reforzado con espiral
- ❸ Conector (macho) de 15 mm

### *i* Código de color TRACOE mini:

- REF 350
- REF 355

El código de color está impreso sobre cada embalaje de forma visible. Garantiza la fácil orientación en el almacén y la localización rápida y segura de la cánula requerida.

### *i* Contenido del volumen de suministro de las cánulas TRACOE mini:

Un obturador y una cinta ancha, de ajuste longitudinal, así como una ficha técnica de la cánula con 2 etiquetas de producto desprendibles. La cinta también está disponible por separado (REF 903-G).



### *i* Accesorios especiales para TRACOE mini:

- ◆ Adaptador de 22 mm, disponible por separado como adaptador para utilizar con cánulas con conector de 15 mm (REF 622, página 60)
- ◆ Encontrará cintas y compresas en las páginas 76, 83 y 84 del programa de accesorios TRACOE care