

# Leukomed® T

## Apósito transparente adhesivo semioclusivo.

### Descripción

Apósito transparente estéril semioclusivo, de poliuretano con adhesivo de poliacrilato. El adhesivo está completamente cubierto con papel blanco siliconado y por una lámina de aplicación superior con una banda roja que facilita su uso.

### Características

- Semipermeable: permeable al vapor de agua y oxígeno e impermeable ante microorganismos y contaminantes externos.
- Resistente al agua.
- Bien tolerado por la piel, incluso por la piel sensible.
- Radiotransparente.
- Transparente, permite inspección visual en cualquier momento.
- Buen poder adhesivo, sin ser agresivo.
- Flexible, se adapta bien a los contornos.
- El material del apósito permite su rotulación en toda la superficie.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.



### Esterilización

- Óxido de Etileno.

### Almacenamiento

- En condiciones secas, alejado de la luz y el calor.

### Recomendaciones de uso

- Para cubrir heridas planas, como heridas post operatorias o cirugías mínimamente invasivas. Uso por un período de uno a varios días, dependiendo del estado de la herida y la condición de la piel.
- Aplicar en la zona elegida, fijando todos los bordes con firmeza, y al final, retirar la película superior desde la banda roja.



### Composición

- Sustrato: Película de poliuretano (peso: 18±2 g/m<sup>2</sup>)
- Adhesivo: Poliacrilato (peso: 28±3 g/m<sup>2</sup>)

### Procedencia Certificaciones de calidad

Alemania

ISO 13485 / CE

### Presentaciones Leukomed® T


Código	ID Convenio Marco	Descripción	Unidad de Venta
72381-00000	1299385	5 cm x 7.2 cm	Caja x 50 Unidades
72381-00004	-	8 cm x 10 cm	Caja x 50 Unidades
72381-00008	1299379	10 cm x 12.5 cm	Caja x 50 Unidades
72381-00014	1582435	10 cm x 25 cm	Caja x 50 Unidades
72381-00009	1427589	15 cm x 20 cm	Caja x 50 Unidades

**LATEX  
FREE  
FORMULA**


# Leukomed<sup>®</sup> T

Apósito transparente adhesivo semioclusivo.


## Paso a Paso para una correcta aplicación de Leukomed<sup>®</sup> T

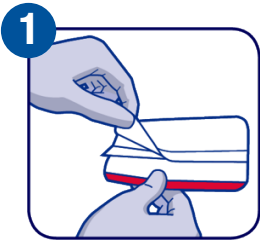


1 Remueva una lámina del papel protector posterior.

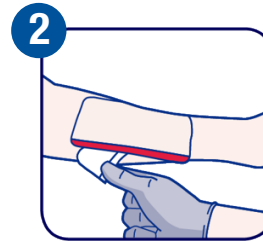

2 Aplique en la zona elegida, asegúrese que la piel se encuentre limpia y seca. Remueva el resto del papel protector.

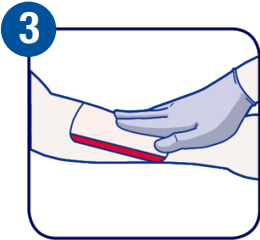

3 Alise la película con la yema de los dedos, especialmente por los bordes para su completa fijación.

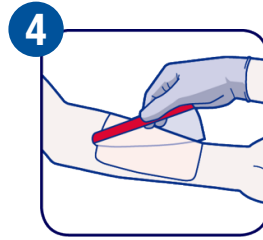

4 Retire la lámina transparente superior, comenzando por la banda roja de fácil aplicación en un solo movimiento.