



## Comprilan®

### TIPO PRODUCTO

Venda de algodón de corta extensibilidad para indicaciones linfológicas y flebológicas

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Corta extensibilidad – 90%**, debido al tipo de trama.
- **Elevada presión de trabajo / interna**, ejerce de soporte a la bomba muscular.
- **Baja presión de reposo / externa (16 – 20 mmHg)**, al no contener fibras elásticas.
- **Estructura con microporos y composición 100% algodón**, aseguran la transpirabilidad.
- **Larga duración**, bordes resistentes al deshilachamiento, así como resistente al sudor, pomadas y ungüentos.
- **Se puede lavar y secar**, en las condiciones clínicas usuales.

### INDICACIONES

Vendajes de compresión en indicaciones flebológicas y linfológicas. Indicado para auxiliar la función de la bomba muscular, y mejorar así, la hemodinámica venosa y linfática (siempre que el paciente deambule):

- Eliminación de la estasis venosa y linfática.
- Insuficiencia venosa crónica. Varicosis
- Ulcus cruris venosum.
- Tromboflebitis.
- Trombosis venosa profunda.
- Tratamiento postoperatorio por “stripping” venoso y escleroterapia.
- Reducción de Linfedema primario y secundario.

### MODO DE ACCIÓN

Ejerce un continuo gradiente de presión decreciente de distal a proximal si se aplica correctamente. Proporciona elevada presión de trabajo cuando se está en movimiento y baja presión en reposo, actuando de soporte a la bomba muscular. Mejora el flujo sanguíneo del Sistema venoso profundo.

### INSTRUCCIONES DE USO

Desenrollar aproximadamente unos 20 – 30 cm antes de su aplicación. Aplicar sin tensión. Para la sujeción o fijación del vendaje se aconseja utilizar esparadrapo de tela, Leukoplast®. Debido a su baja presión en reposo, puede mantenerse aplicada durante la noche.

# Comprilan®

Venda de corta extensibilidad 100% algodón.

## Descripción

Comprilan® es un vendaje de corto estiramiento, que funciona a partir del principio de aplicar poca presión en el momento en que el músculo descansa o no está activo. Cuando el músculo se activa, como el de la pantorrilla al caminar, el vendaje de poca elasticidad aplica una resistencia sobre el músculo que también se conoce con el nombre de presión de trabajo.

La resistencia o presión de trabajo que ejerce el vendaje de corto estiramiento Comprilan® se debe a su característica de estiramiento limitado. Comprilan® sólo se estira un 90% o menos que su largo. Esto es opuesto a lo que sucede con los vendajes de alta elasticidad que se estiran hasta 3 veces su largo. La característica de poca elasticidad permite que Comprilan® se utilice durante el descanso y en actividades.

## Características

- El tejido de interlock otorga esta característica de poca elasticidad que asegura una presión consistente.
- Anatómicamente conformada para permitir la libertad de movimiento.
- Excelente tolerancia en la piel.
- Durable y resistente.
- Puede ser lavada en múltiples oportunidades a 40° sin perder sus características.
- Los extremos no se deshilachan.
- Tejido de tacto suave.
- Baja presión con la extremidad en reposo, alta presión con la extremidad en trabajo.
- Permeable al aire.
- Fácil de aplicar.
- Favorece la eliminación de estasis linfático.
- Color beige.
- Libre de latex.
- Vida útil: 5 años.

## Esterilización

- No estéril.

## Almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco.

## Recomendaciones de uso

- Para uso en manejo de edema y linfedema: Varicosis, insuficiencia venosa crónica, fleboedema, tromboflebitis, trombosis venosa profunda, tratamiento post operatorio, linfedema primario y secundario.

## Composición

- 100% algodón.

## Procedencia

EEUU

## Certificaciones de calidad

ISO 13485 / FDA



# Comprilan®

Venda de corta extensibilidad 100% algodón.

---

## Presentaciones Comprilan®

| Código      | ID Convenio Marco | Descripción | Unidad de Venta |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 01027-00000 | 1391725           | 8cm x 5mt   | Caja individual |
| 01028-00000 | 1377709           | 10cm x 5mt  | Caja individual |