



## Comprilan®

### TIPO PRODUCTO

Venda de algodón de corta extensibilidad para indicaciones linfológicas y flebológicas

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Corta extensibilidad – 90%**, debido al tipo de trama.
- **Elevada presión de trabajo / interna**, ejerce de soporte a la bomba muscular.
- **Baja presión de reposo / externa (16 – 20 mmHg)**, al no contener fibras elásticas.
- **Estructura con microporos y composición 100% algodón**, aseguran la transpirabilidad.
- **Larga duración**, bordes resistentes al deshilachamiento, así como resistente al sudor, pomadas y ungüentos.
- **Se puede lavar y secar**, en las condiciones clínicas usuales.

### INDICACIONES

Vendajes de compresión en indicaciones flebológicas y linfológicas. Indicado para auxiliar la función de la bomba muscular, y mejorar así, la hemodinámica venosa y linfática (siempre que el paciente deambule):

- Eliminación de la estasis venosa y linfática.
- Insuficiencia venosa crónica. Varicosis
- Ulcus cruris venosum.
- Tromboflebitis.
- Trombosis venosa profunda.
- Tratamiento postoperatorio por “stripping” venoso y escleroterapia.
- Reducción de Linfedema primario y secundario.

### MODO DE ACCIÓN

Ejerce un continuo gradiente de presión decreciente de distal a proximal si se aplica correctamente. Proporciona elevada presión de trabajo cuando se está en movimiento y baja presión en reposo, actuando de soporte a la bomba muscular. Mejora el flujo sanguíneo del Sistema venoso profundo.

### INSTRUCCIONES DE USO

Desenrollar aproximadamente unos 20 – 30 cm antes de su aplicación. Aplicar sin tensión. Para la sujeción o fijación del vendaje se aconseja utilizar esparadrapo de tela, Leukoplast®. Debido a su baja presión en reposo, puede mantenerse aplicada durante la noche.