

MANEJO Y USO DE LA CPAP DE BOUSSIGNAC® DE VYGON

CONTENIDO DEL SET



VÁLVULA Y PROLONGADOR MANÓMETRO



MASCARILLA




ARNÉS




ANILLO REGULADOR FIO2




NEBULIZADOR

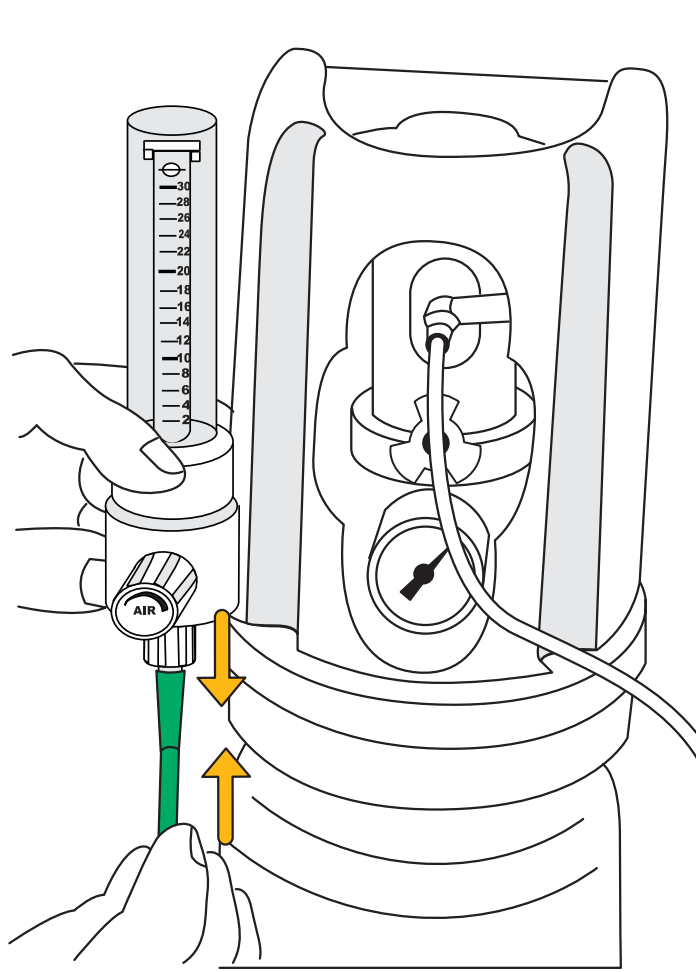


Conectar el tubo verde de la válvula a la fuente de O₂

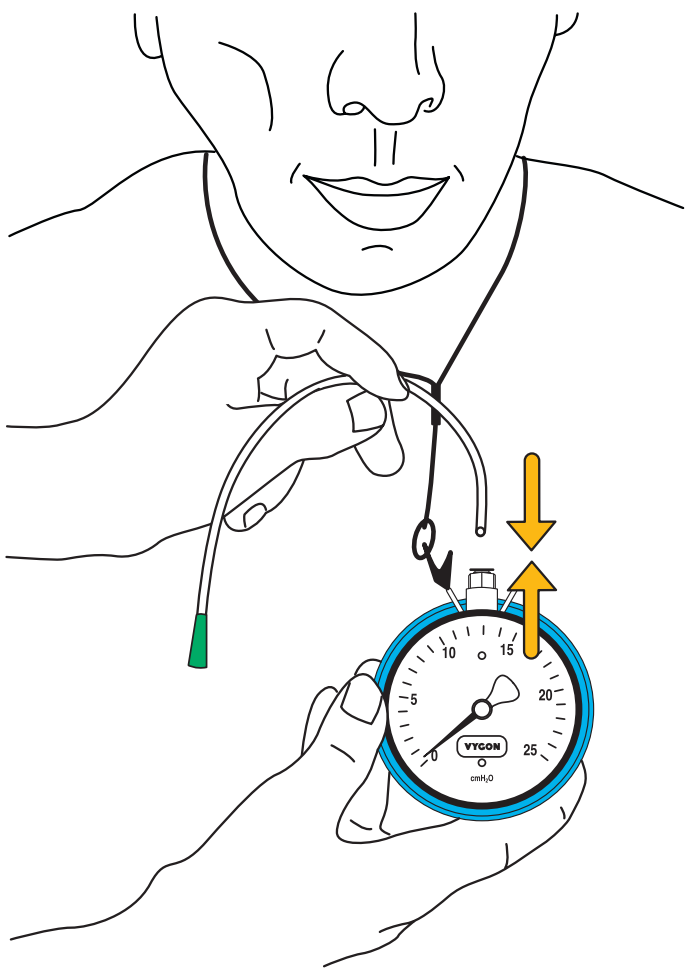


Conectar el prolongador del manómetro de uso único al manómetro

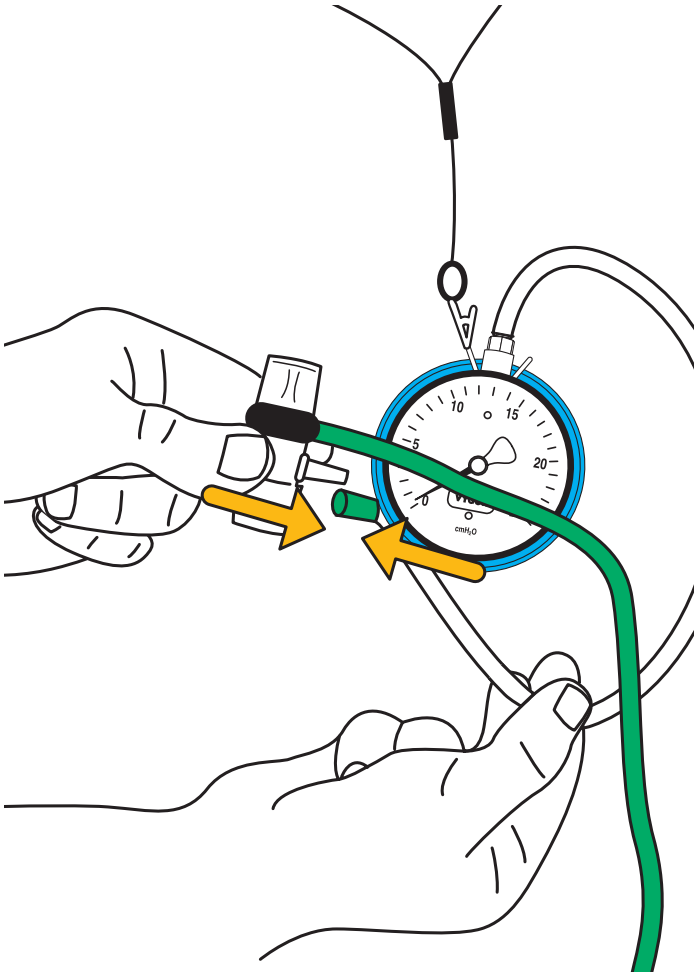


Conectar el manómetro a la toma de la corriente de la válvula

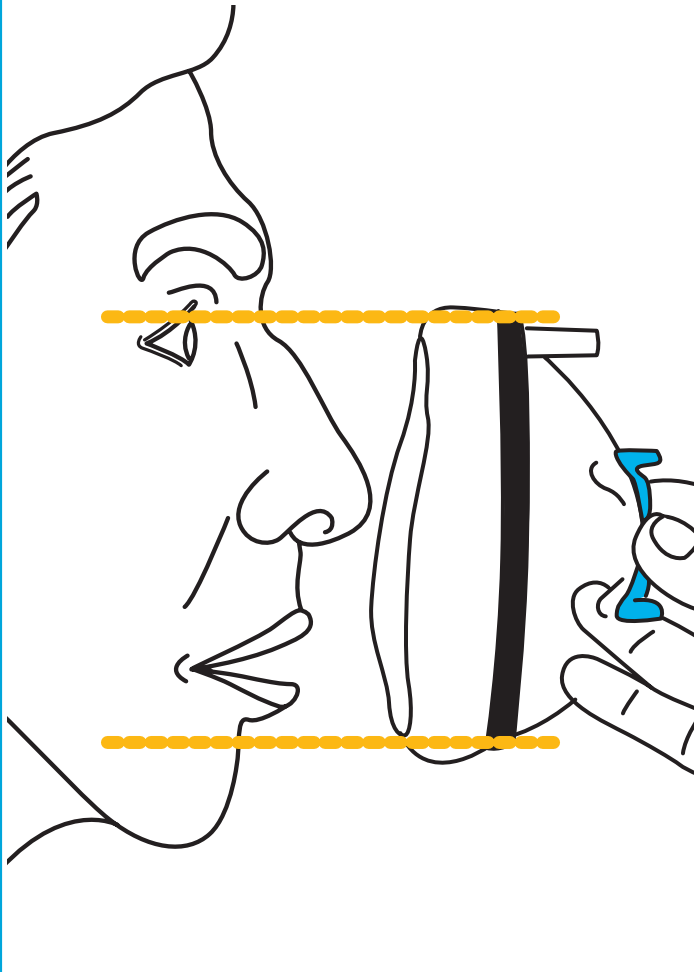


Elegir y adecuar tamaño de mascarilla al paciente

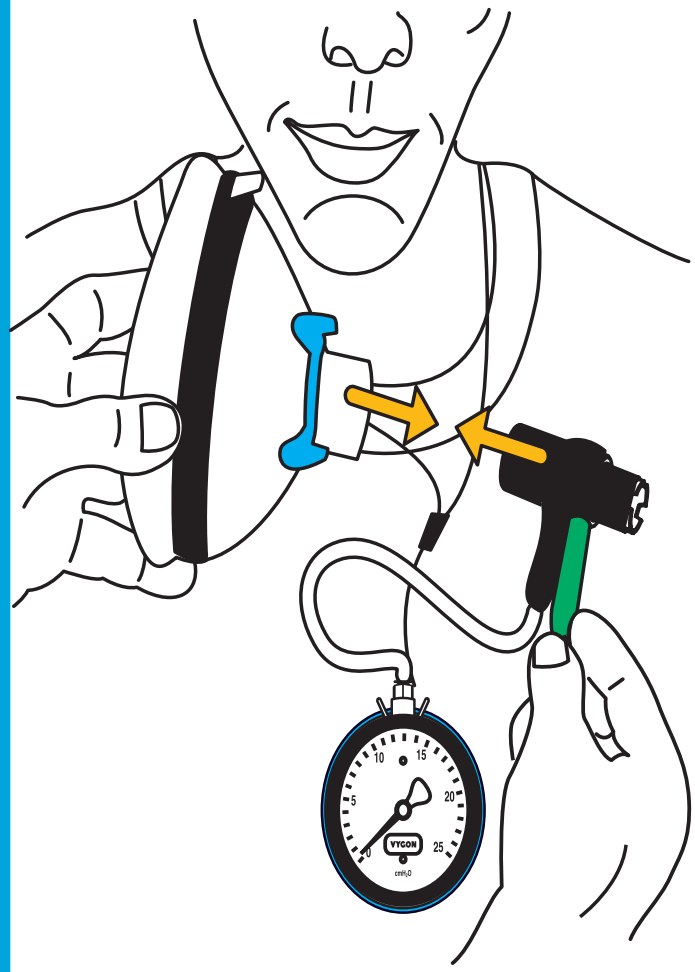


Conectar la válvula a la mascarilla

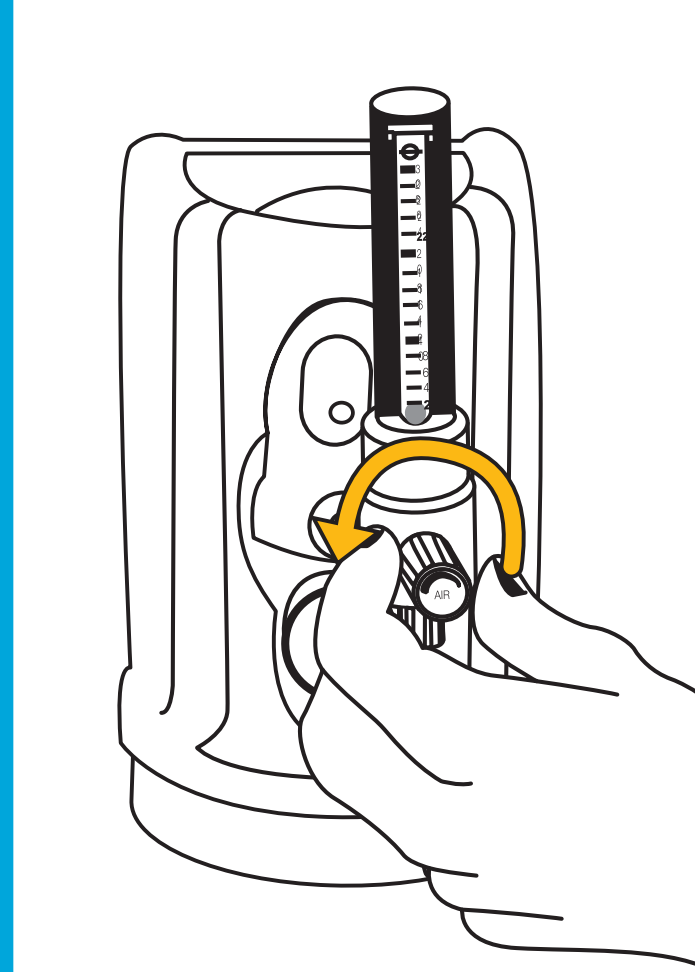


Abrir fuente de O₂

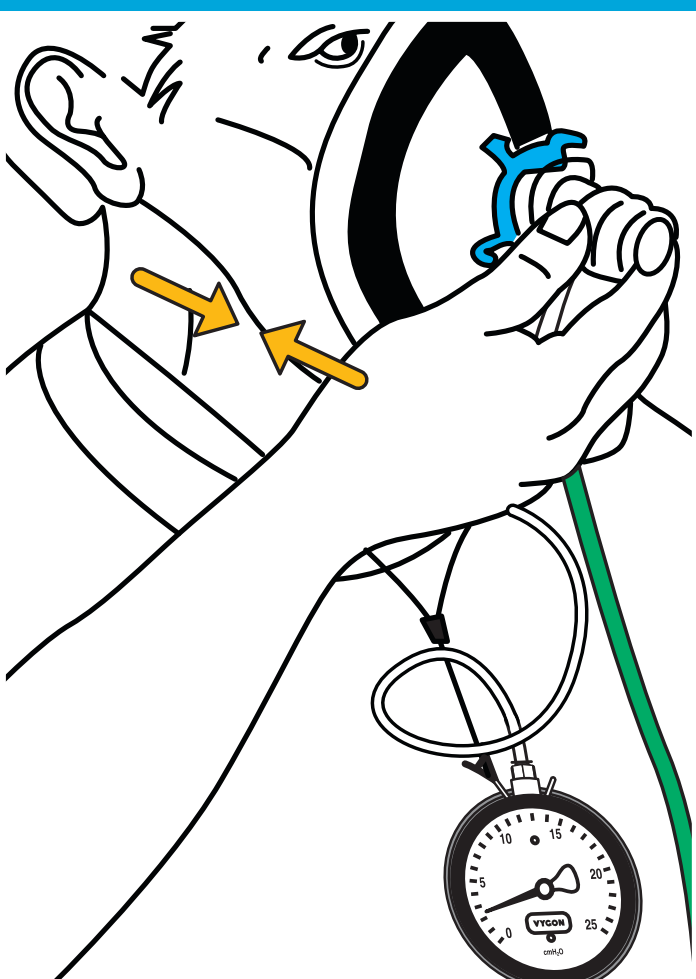


Explicar la técnica. Acercar la mascarilla sin presión

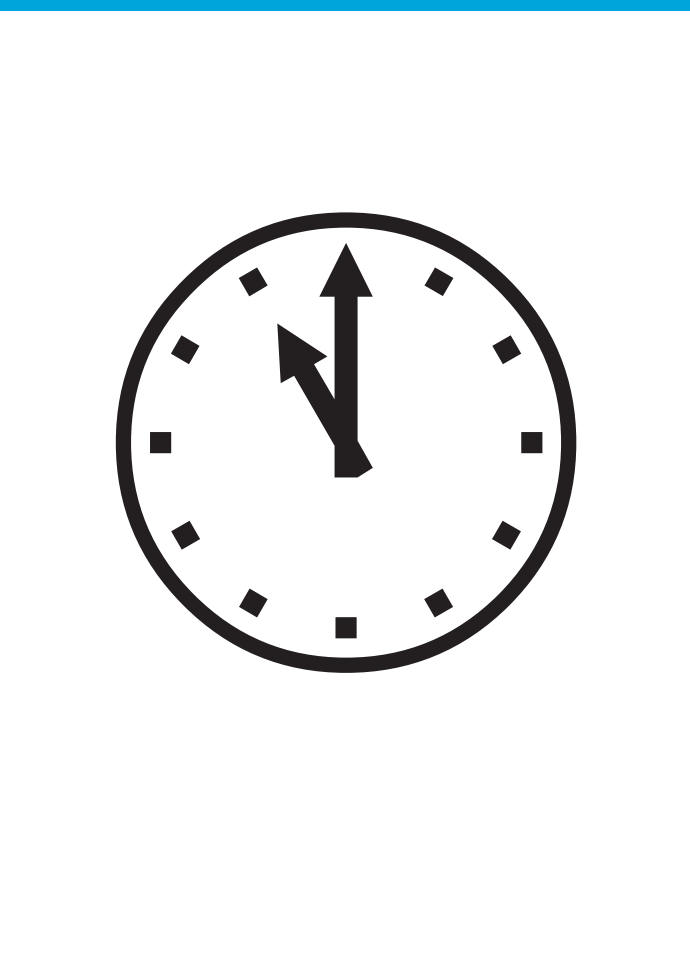


2 - 5 minutos

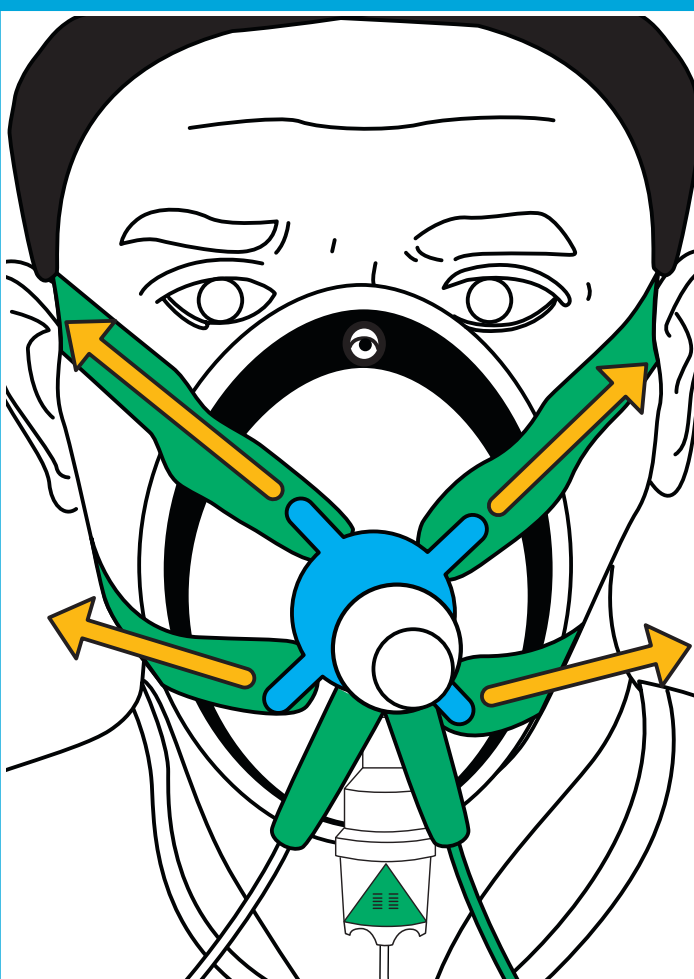


Fijar la mascarilla con el arnés

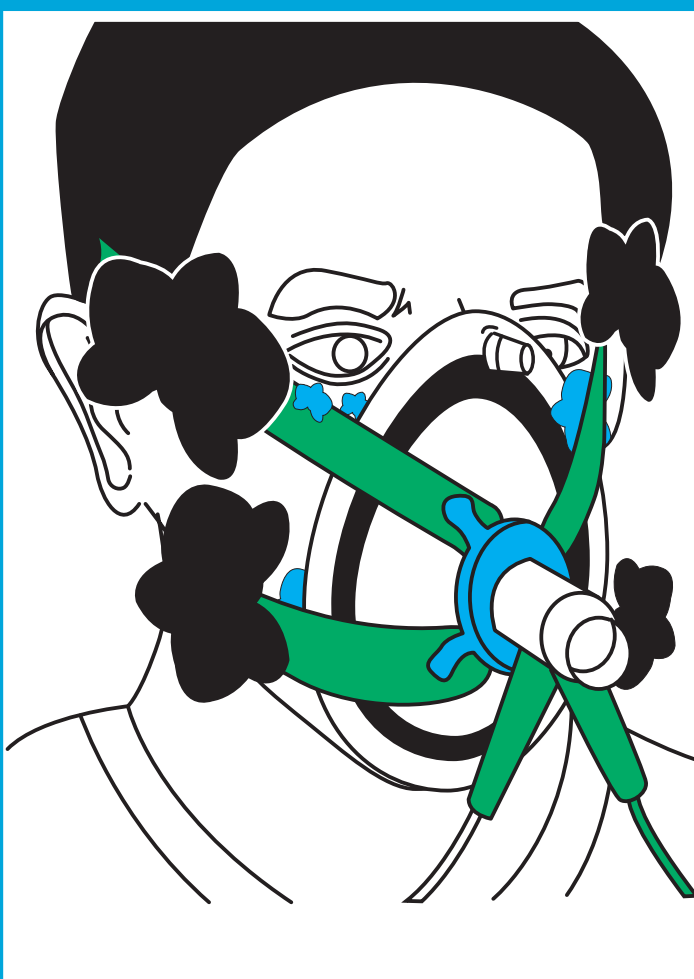

Buscar posibles fugas hinchando o deshinchando el borde de la mascarilla

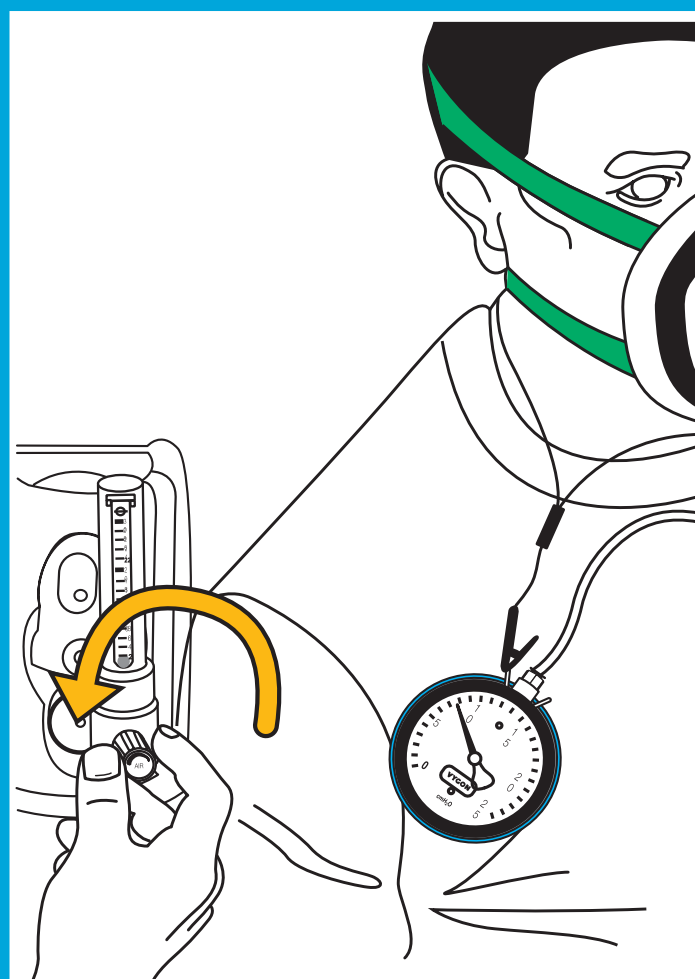

Ajustar la CPAP inicialmente a 5 cm de H₂O e incrementar de 2 cm en 2 cm de H₂O hasta un máximo de 12 cm de H₂O

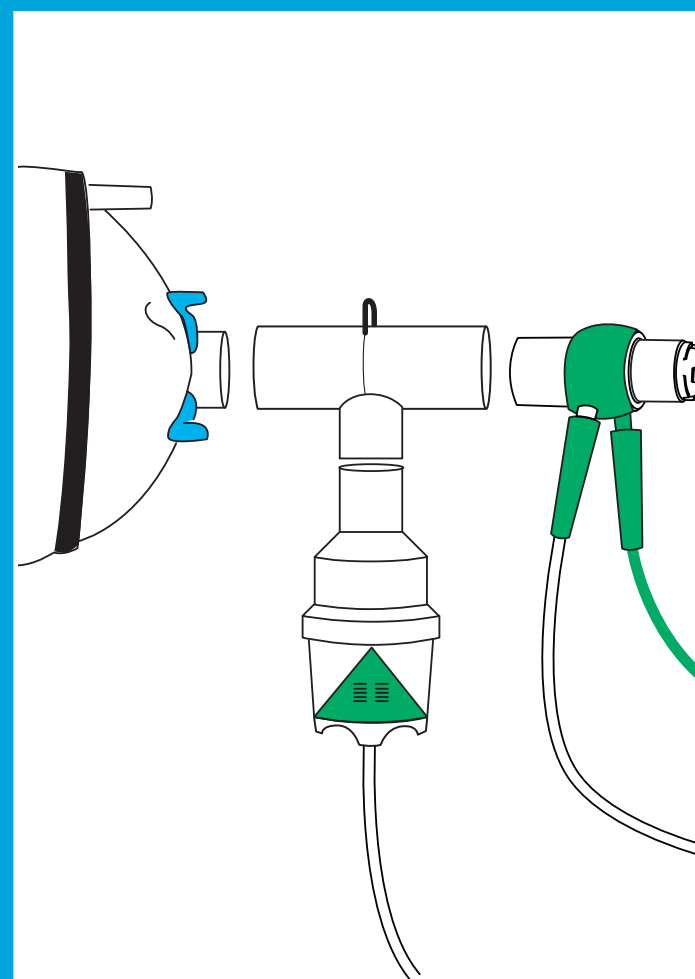

Montaje para la nebulización

Solicite a su delegado de ventas VYGON o a marketing@vygon.es el manual de bolsillo:

Manual de manejo de CPAP de Boussignac® para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda

Jose Manuel Carratalá Perales / Alejandro Ricardo Albert Giménez. *Médicos adjuntos del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Alicante*

